



Версия 3.3

**ЛИНС МАХАОН РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ВРАЧА**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

ЛИНС.РСВ.2015.INST

Листов 11

# АННОТАЦИЯ

В документе приведено руководство оператора для установки ПО «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по для вариантов исполнения/конфигураций:

ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Рентген и УЗИ,  
ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Маммография,  
ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Ангиография,  
ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Томография,  
ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Томография 3D,  
ЛИНС Махаон Рабочая станция врача: Максимальная.

В документе приведены следующие сведения:

- условия выполнения задач программного продукта;
- описание последовательности действий оператора, обеспечивающих установку ПО;

Компания ЛИНС предприняла соответствующие меры для обеспечения достоверности настоящего документа. Тем не менее, компания ЛИНС не несет ответственности за ошибки и упущения в нем и оставляет за собой право вносить изменения без дальнейших уведомлений об этом в любые изделия, упомянутые в настоящем документе, с целью повышения их надежности, функциональности или улучшения эргономичности или дизайна. Компания ЛИНС имеет соответствующие права в любое время осуществлять модернизацию и вносить изменения в программное обеспечение, описанное в настоящем документе.

# 1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

## 1.1. Системные требования

### 1.1.1. Минимальные требования

В качестве аппаратной платформы необходимо использовать ПК с характеристиками не ниже:

Процессор: 2000 MHz

Оперативная память: 1024 Мб

Разрешение монитора: 1024x768

Видеоадаптер: 512 Мб

Жесткий диск: 120 Гб

CD-ROM для установки программы

При необходимости печати изображений: лазерный или струйный принтер.

При необходимости пересылки изображений по сети: сетевая карта.

Обязательным является наличие трехкнопочной мыши (желательно с колесиком скроллинга) и USB-порта.

**Внимание!** На компьютерах с более слабыми техническими характеристиками высока вероятность некорректной работы программы.

### 1.1.2. Оптимальная конфигурация

В качестве аппаратной платформы оптимально использовать компьютер с характеристиками:

Процессор: Intel Core i-3 3300 MHz и выше

Оперативная память: 2048 Мб и выше

Разрешение монитора: 1600x1200 или 2 монитора 1600x1200

Жесткий диск: 300 Гб

DVD-RW с возможностью чтения/ записи CD (DVD)

Сетевая карта 1000 Мбит

Принтер лазерный, 600 DPI

Обязательным является наличие трехкнопочной мыши (оптимально с колесиком скроллинга) и USB-порта.

## 1.2. Требования к программному обеспечению

Для обеспечения нормального функционирования программы «Рабочая станция врача» необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система семейства Microsoft Windows: XP/Vista/7/8;
- программное обеспечение система управления базами данных Firebird версии 2.0.3/2.5;
- при необходимости пересылки медицинский изображений между рабочей станцией врача и другими DICOM-узлами нужно настроить для работы друг с другом

## 1.3. USB ключ

Электронный USB ключ необходим для корректной работы программы «Рабочая станция врача». В комплект поставки входит локальный (локальные) или сетевой ключи. Локальные ключи имеют зеленый или голубой цвет пластика (Рисунок 1), сетевые – серый (Рисунок 2). Также локальные ключи могут поставляться в форм-факторе микро-ключа. От классической модели они отличаются только размерами. Все типы ключей не требуют дополнительной установки драйверов, операционная система устанавливает драйвер автоматически.



Рисунок 1



**Рисунок 2**

Локальный ключ устанавливается в порт компьютера, на котором будет осуществляться работа с программой.

Для работы с программой необходимо вставить ключ в свободный USB порт, дождаться, пока система установит его драйвер. После этого можно запускать программу.

## 2. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

### 2.1. Установка программы

Вставьте компакт-диск в CD-привод. Программа установки запускается автоматически, если функция автозапуска не активна, запустите программу autorun.exe из корневого каталога CD.

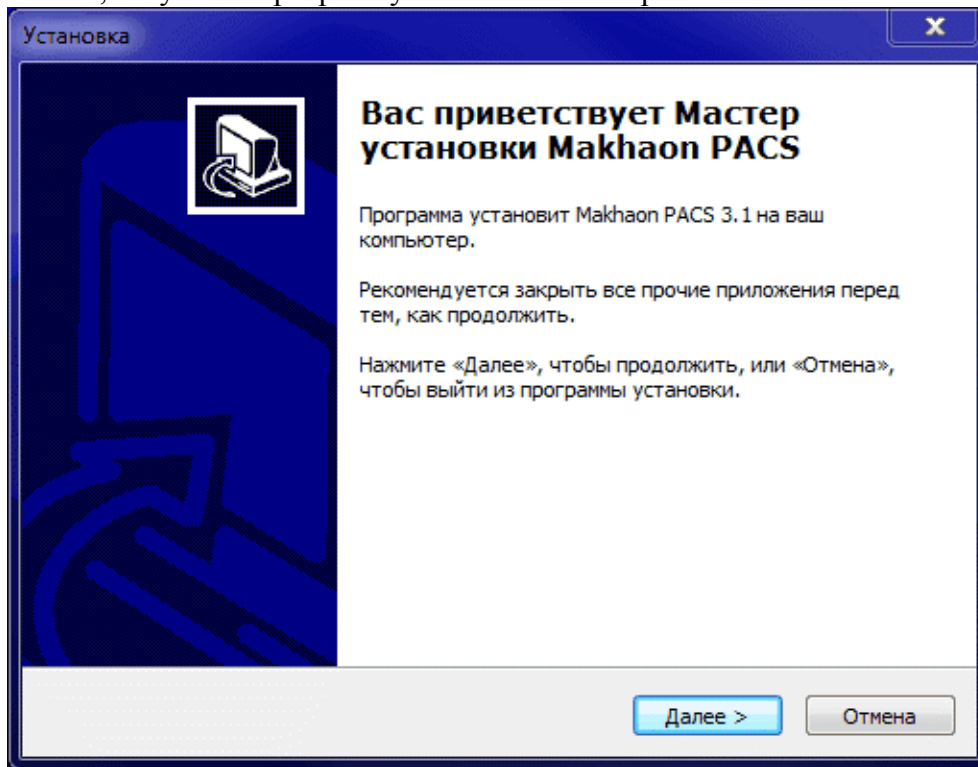


Рисунок 3

В случае, если система управления базами данных Firebird версии не установлена в системе, нажмите кнопку «Далее».

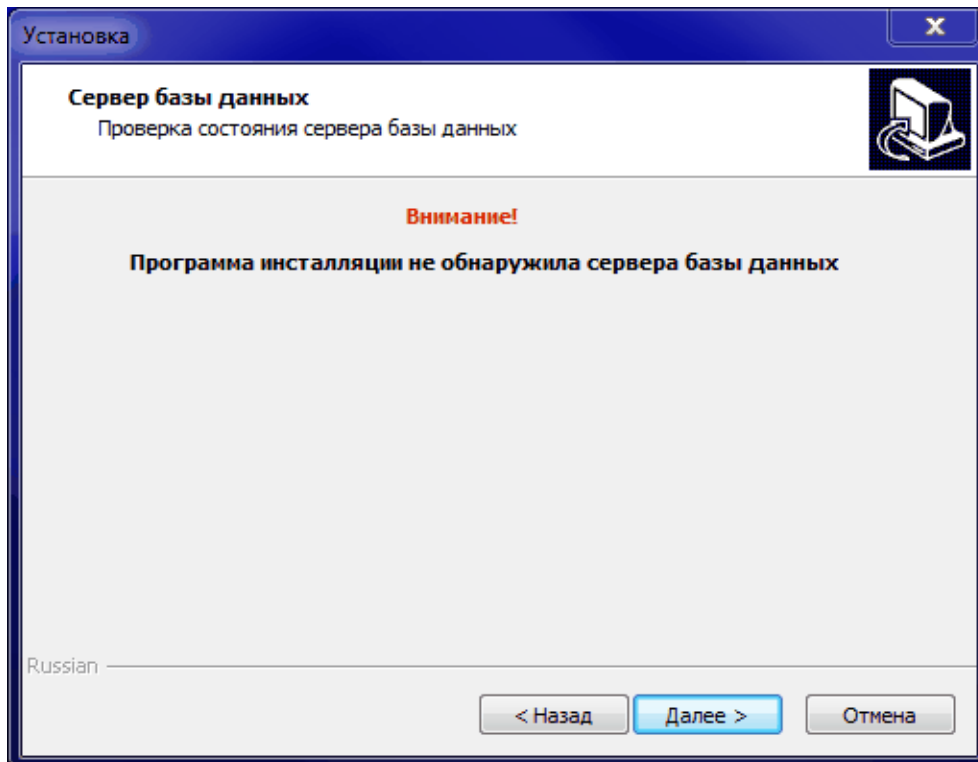


Рисунок 4

Выберите пункт «Установить Firebird»

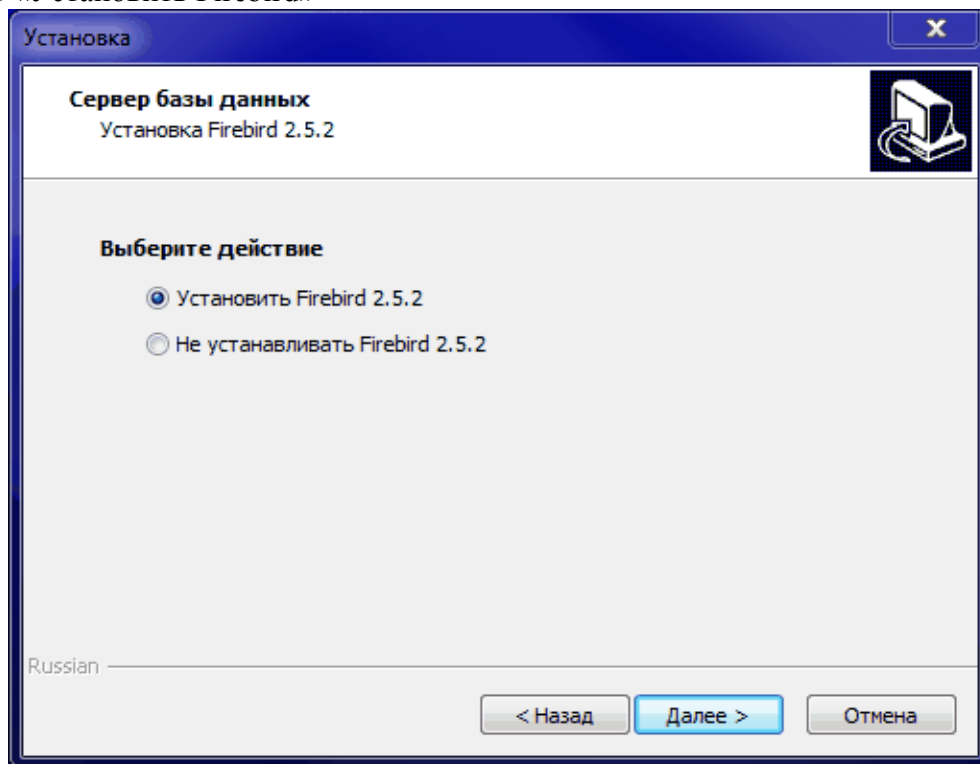


Рисунок 5

В случае, если в программа обнаружила установленный сервер базы данных и он работоспособен, появится следующее окно:

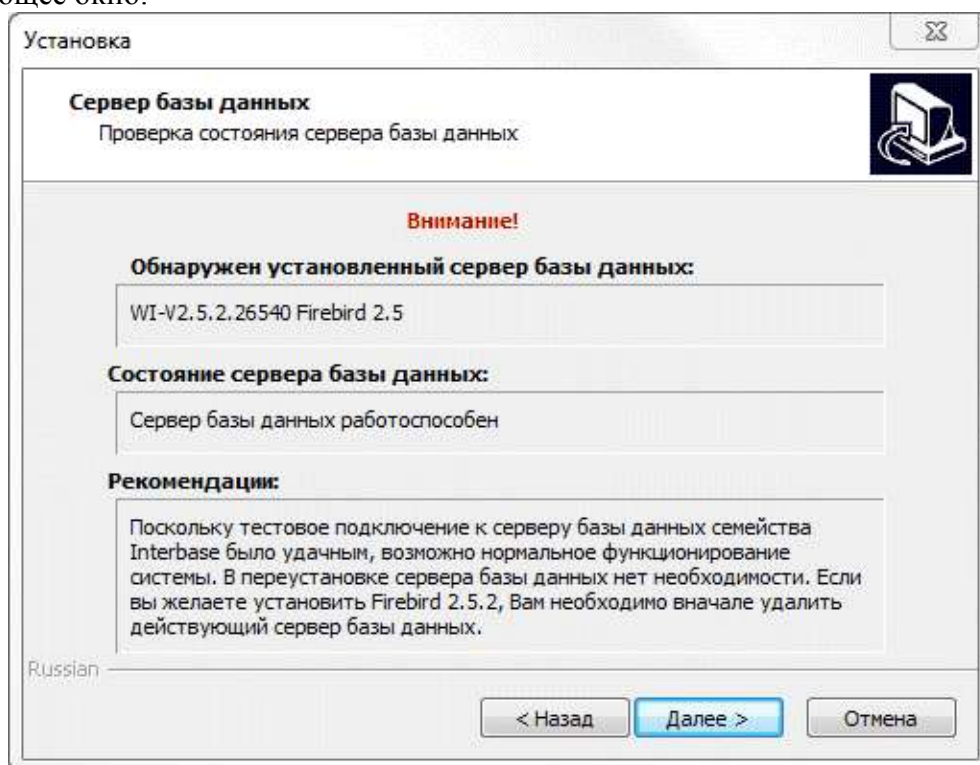


Рисунок 6

Выберите пункт «Не устанавливать Firebird»

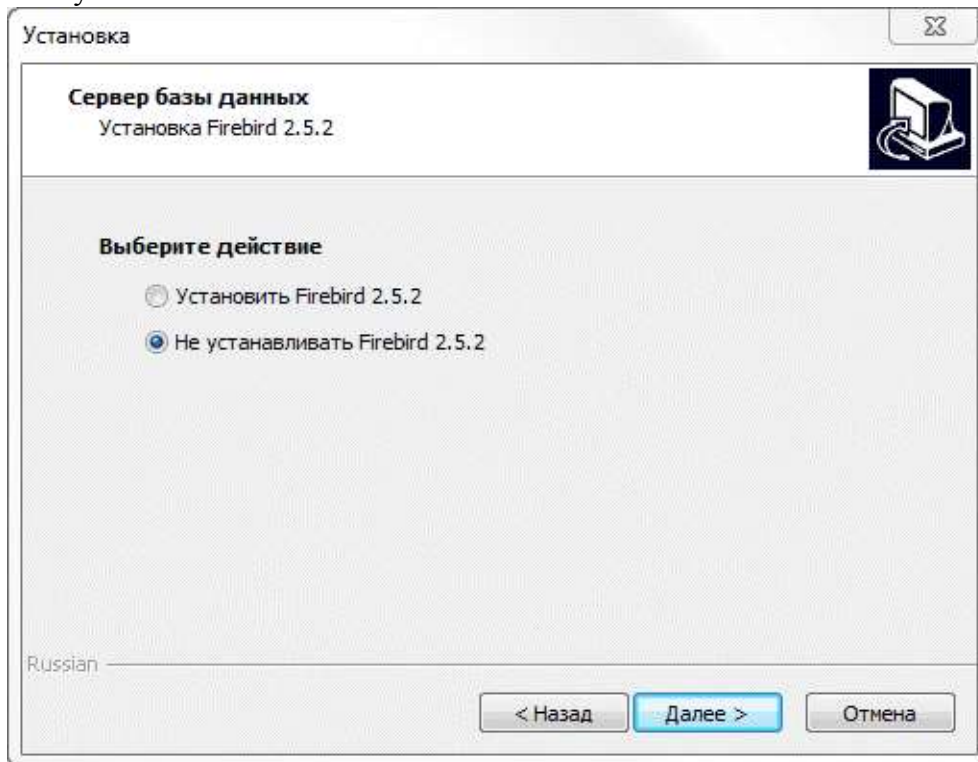


Рисунок 7

Выберите папку для установки программы.

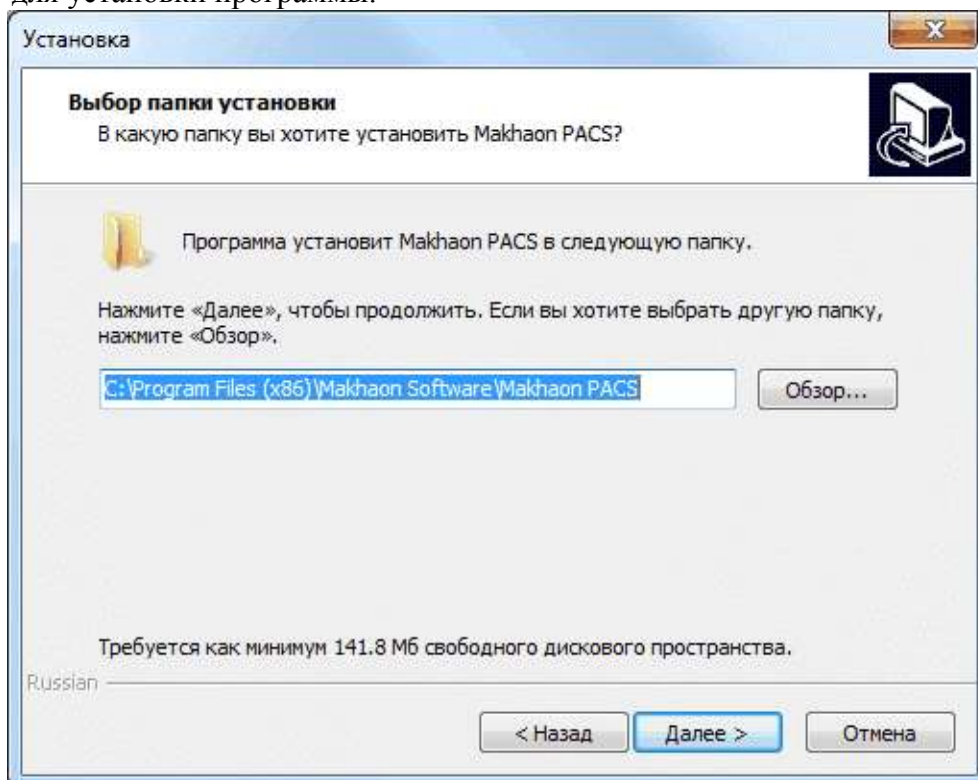


Рисунок 8

Укажите путь к базе данных.

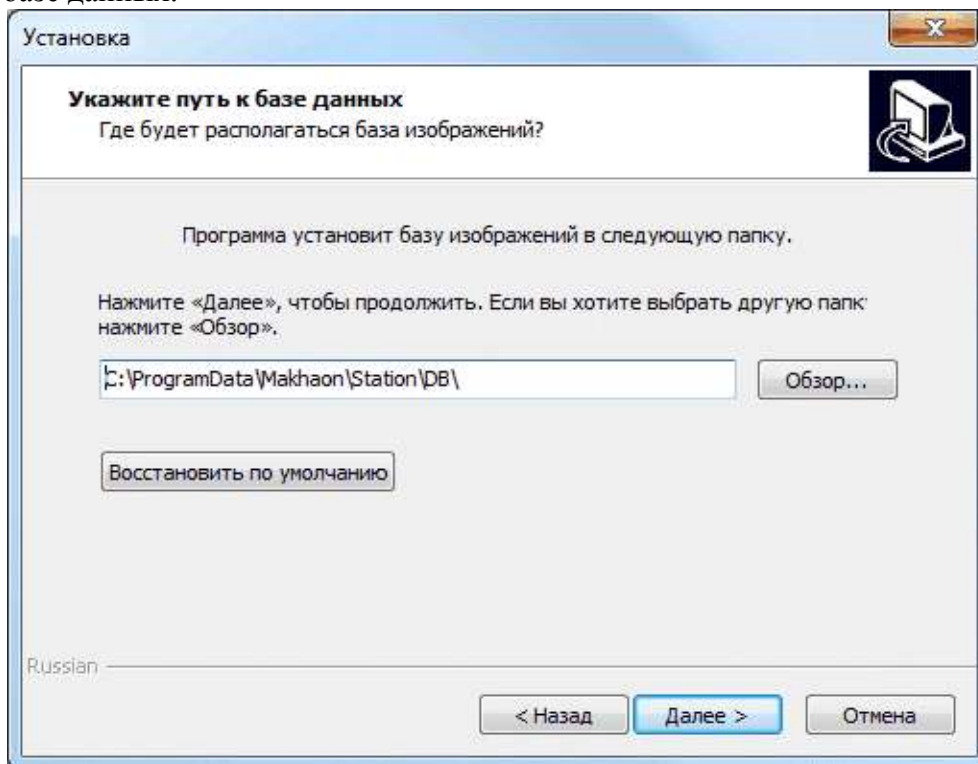


Рисунок 9

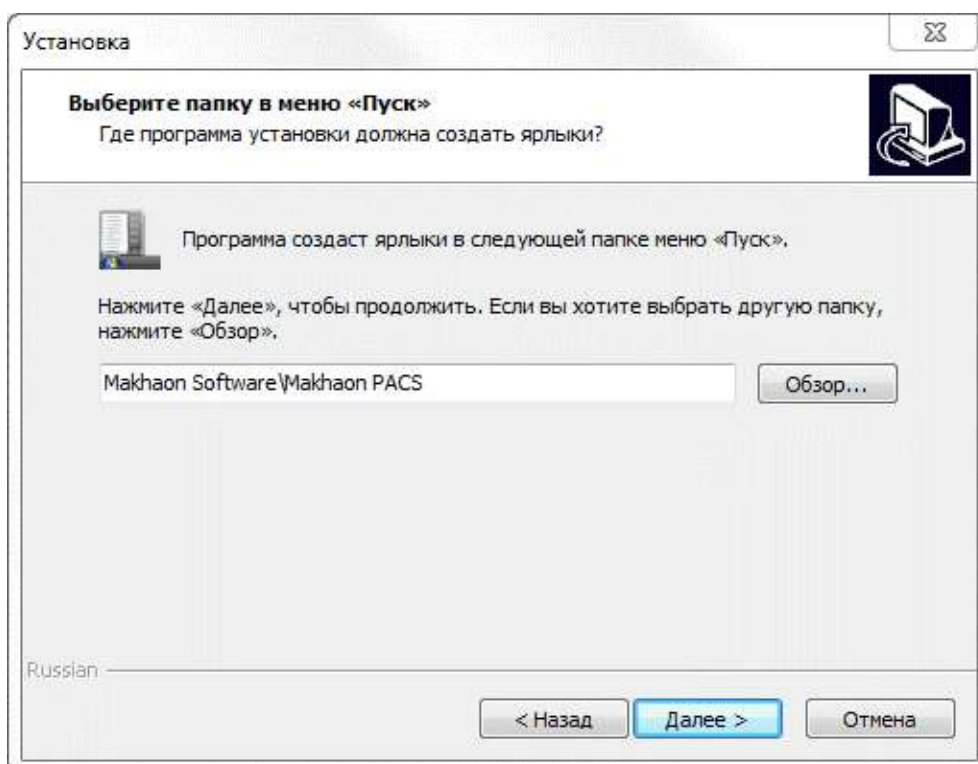


Рисунок 10



Выберите дополнительные задачи.

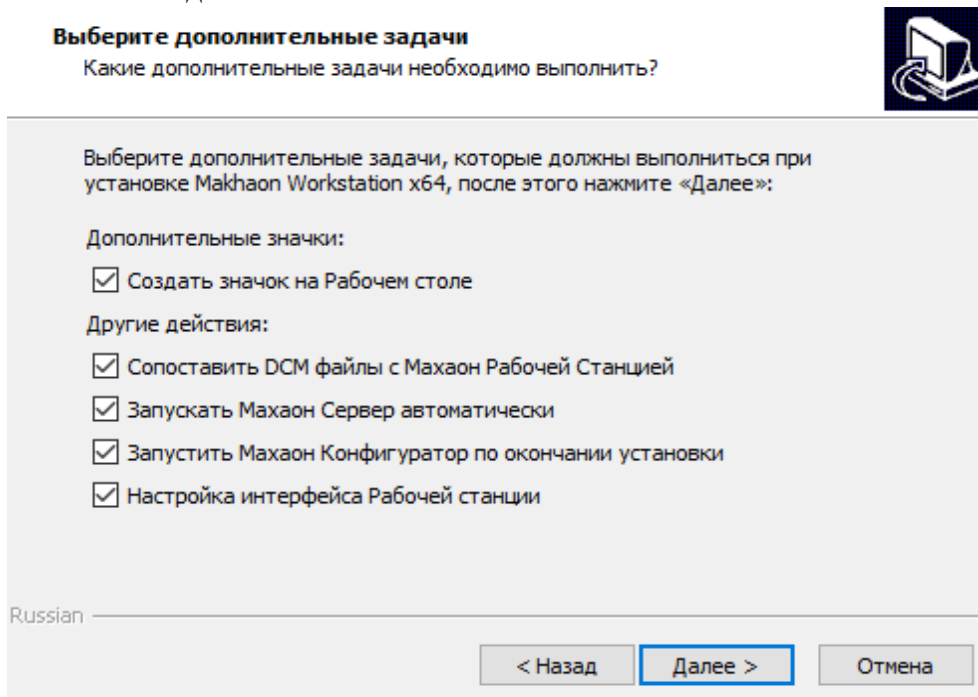


Рисунок 11

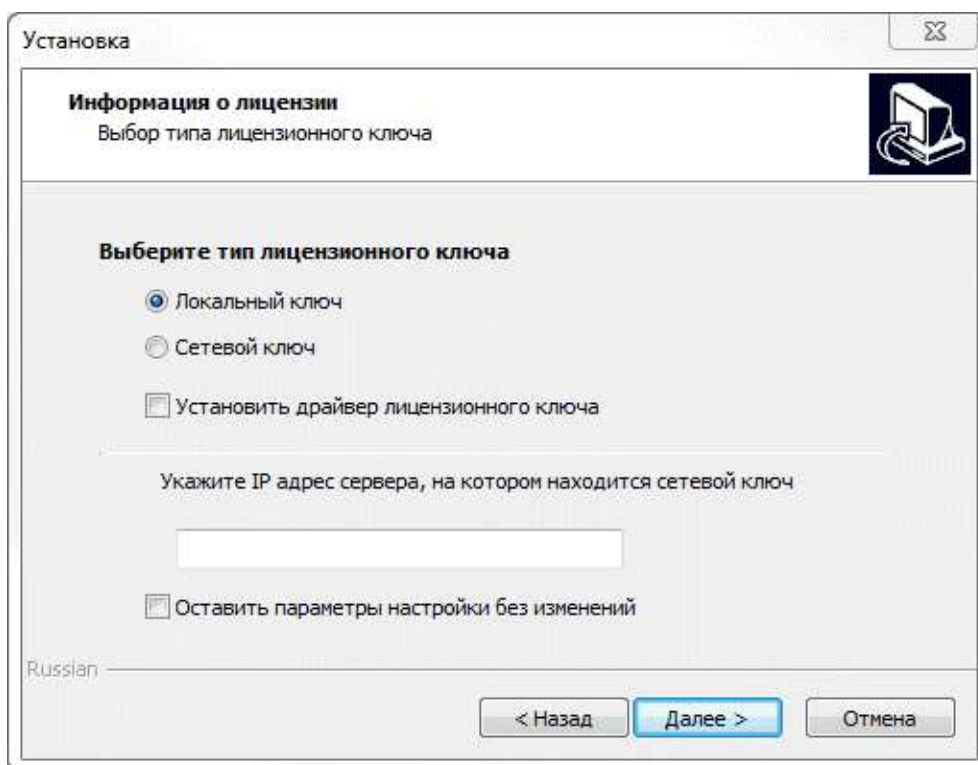


Рисунок 12

Выберите вид кнопок

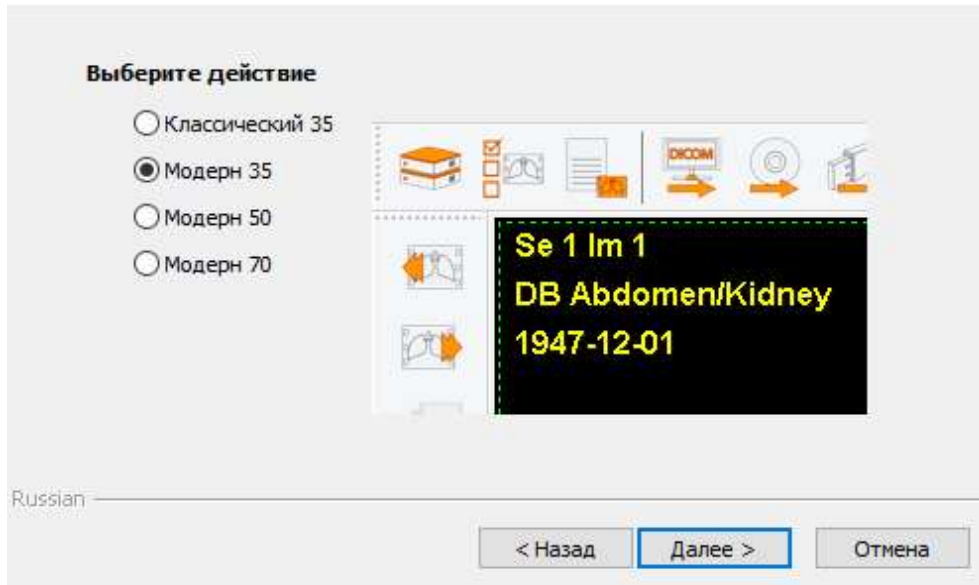


Рисунок 13

и тему интерфейса

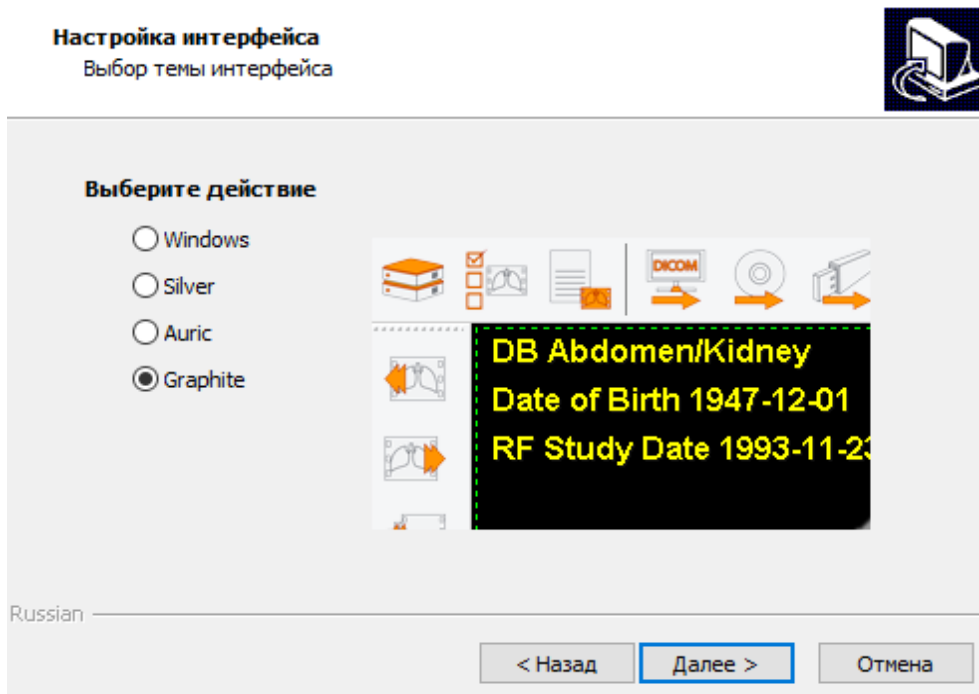


Рисунок 14

Завершите установку программы.

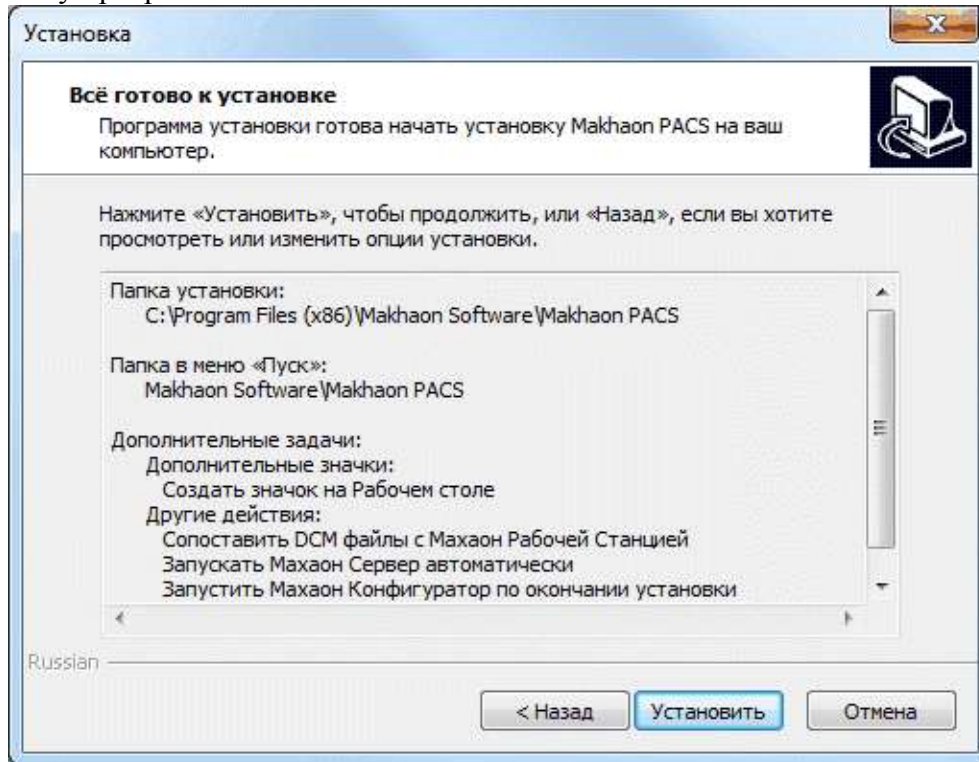


Рисунок 15